

# Preberací protokol

## antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie

poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

Odvzdávajúci (RÚŠS): .....

Preberajúci (škola): .....

Počet odovzdaných antigénových samotestov: .....

**Predmet odovzdania:** Antigénové samotesty na domáce použitie značky Siemens Healthineers

### Obsah balenia:

- 1 návod výrobcu na použitie pri samotestovaní
- 1 stručná referenčná príručka
- 5 kusov sterilných tampónov
- 5 testovacích jednotiek
- 5 extrakčných skúmaviek s pufrom a špičkami

### Dôležité upozornenia:

Preberajúci preberá antigénové testy na domáce samotestovanie pre žiakov školy, ktorých rodičia, resp. plnoletí žiaci o ne prejavili záujem. Antigénové samotesty sú určené na použitie v školskom roku 2022/2023. Testovanie sa bude realizovať preventívne, resp. podľa potreby v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19 podľa inštrukcií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Škola, ktorá preberá antigénové samotesty z RÚŠS nahlasuje odovzdanie antigénových samotestov rodičom, resp. plnoletým žiakom, ktorí prejavili o ne záujem spôsobom, ktorý určí príslušný RÚŠS (napr. e-mail). Takýmto spôsobom sa preukáže spotreba antigénových samotestov. Rodičia, resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.

Preberajúci svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

- Antigénové samotesty sú určené na odovzdanie rodičovi žiaka, resp. plnoletému žiakovi, ktorý o ne prejavil záujem, výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19.
- V prípade, ak preberajúci antigénové samotesty neodovzdá rodičovi žiaka, resp. plnoletému žiakovi, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich RÚŠS vrátiť.

### Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers

#### Krok 1: Vloženie skúmavky do pracovnej stanice

Vložte skúmavku do pracovnej stanice dodanej so súpravou.

Pri súpravách obsahujúcich vopred naplnené odberové skúmavky: Z vrchnej časti skúmavky zložte fóliu.

Pri súpravách s fľaštičkami s tlmivým roztokom: Do skúmavky pridajte 10 kvapiek tlmivého roztoku.

#### Krok 2: Odber vzorky z nosa

Použite dodávanú sterilnú výterovú tyčinku a opatrne si ju vložte do jednej nosnej dierky.

Špičku tyčinky zasuňte 2–4cm, kým nepocítite odpor. 5-krát otočte tyčinku v nosnej dierke.

Touto istou tyčinkou zopakujte proces v druhej nosnej dierke, pričom ju znova 5-krát otočte.

Vyberte tyčinku z nosnej dutiny a postupujte podľa pokynov na spracovanie vzorky.

#### Krok 3: Otáčajte tyčinkou

Otočte tyčinku aspoň 6-krát vnútri skúmavky, pričom ju pritlačte o dno aj bočné steny skúmavky.

#### Krok 4: Nechajte postáť a vložte špičku kvapkadla

Nechajte postáť jednu minútu a ešte niekoľkokrát pritlačte. Potom tyčinku bezpečne vyberte a zlikvidujte a špičku kvapkadla vložte do skúmavky so vzorkou.

#### Krok 5: Pridajte vzorku na kazetu

Položte kazetu, označte ju a do nádrčky pridajte 4 kvapky testovacej vzorky.

#### Krok 6: Interpretácia výsledkov

Výsledky budú k dispozícii o 15 minút. Po 20 minútach výsledky už neinterpretujte.

Návod na použitie nájdete aj na webovej stránke výrobcu: <https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk>

V ..... dňa .....

.....  
Podpis  
(Odvzdávajúci)

.....  
Podpis  
(Preberajúci)